

CareSens™ NPOP

血糖監測儀



PGJ5E3033 REV1 03/2014


1. CareSens N POP血糖儀



2. CareSens N POP血糖測試條



3. 採血筆

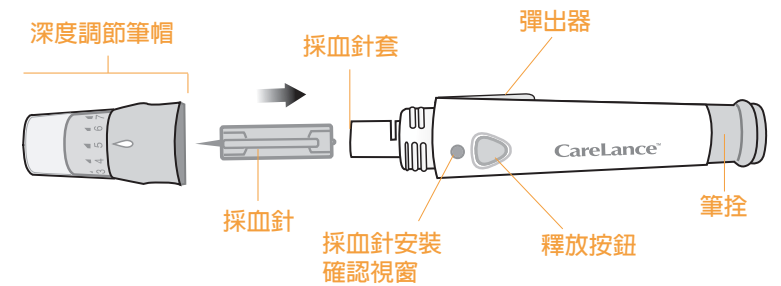

4. 準備採血筆

- 1 旋扭取下深度調節筆帽。
- 2 將新採血針在採血針套中插緊。握緊採血針。輕輕轉動，取下保護盤。用後把保護盤重新套在採血針上。重新裝好採血筆筆帽。
- 3 在採血筆儀器調節筆帽上，選擇所需採血深度，選擇範圍為一至七(1-7)。旋轉調節筆帽的頂端，直到所選刻度與箭頭對齊為止。建議最初設定三(3)刻度。
- 4 筆控向後拉動，直到按鈕彈起，採血筆處於採血狀態。採血針安裝確認視窗變成紅色。

5. 準備血糖儀和測試條

- 5 洗手處和血樣採集點。沖洗手，然後徹底乾燥。
- 6 連接頭面朝上，插入測試條。顯示幕上即顯示▲符號。

6. 採集血樣

- 7 使用採血筆，採集血樣。
- 8 顯示幕出現▲符號後，用測試條窄的一端採集血樣，直到血糖儀發出滴聲。如果確認視窗顯示未裝滿，會出現Er4錯誤短訊息。
- 9 血糖儀從5倒數到1後，即顯示測試結果。測試結果會自動保存到血糖儀的記憶體中。

7. 丟棄使用過的採血針

- 10 拇指按下採血針彈出鍵，將使用過的採血針丟進適當的有害生物容器中。

8. 顯示和訊息

- Er1** 插入的測試條是用過的。
>請使用全新的測試條進行重復測試。
- Er2** 在▲符號尚未出現之前，即已開始採集血樣或採集控制溶液樣本。
>請插入全新的測試條進行重復測試。等到▲符號出現後，才採集血樣或控制溶液樣本。
- Er4** 血樣中血液粘度異常過高或血液量不足。
>請插入全新的測試條進行重復測試。
- Er5** 如果沒有使用CareSens N血糖測試條，而用了錯誤的血糖測試條時，即會出現此錯誤訊息。
>請使用CareSens N血糖測試條進行重復測試。
- Er6** 血糖儀有故障。
>請勿使用血糖儀。請聯繫獲得授權的i-SENS銷售代表。
- HIC** 測試時的溫度高於工作溫度範圍。
- LoC** 測試時的溫度低於工作溫度範圍。

>移到處於工作溫度範圍(5-50攝氏度)的環境中，等到血糖儀和測試條達到工作溫度後，重復測試。

快速指南

CareSens™ **NPOP**
血糖監測儀

